


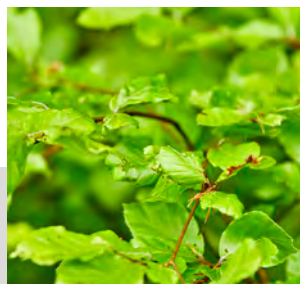

Guide: ABRACE



## KORT OM ABRACE

### Egenskaber

ABRACE er en klassisk lænestol, der fungerer som kognitivt sanseredskab til unge og voksne. Stolen stimulerer berørings- og bevægelsessansen. Med sit udseende kan den integreres som et naturligt møbel i almindelige stuemiljøer.

### Anvendelse

Der bør altid være en individuel faglig vurdering af borgens tilstand inden anvendelse. Ved behov for afhjælpning af fysisk og psykisk uro og reducere af nervøsitet, angst og stress. Kan med fordel anvendes før en terapeutisk indsats for at opnå bedst muligt resultat – eller efter for at afslutte behandlingen.

ABRACE anvendes primært af personer med

- demens
- div. psykiatriske diagnoser
- ADHD
- autismespektrumforstyrrelser
- stress mv.

ABRACE er beregnet til indendørs anvendelse. Vær opmærksom på, at brugeren ikke får det for varmt, når ABRACE anvendes sammen med tyngdetæpper og poncho. ABRACE bør ikke anvendes til børn under 150 cm.

### Tilbehør

- ABRACE tyngdetæppe
- ABRACE tyngdeponcho (fås som 3 og 6 kg.)
- ABRACE krammepude.

### Dokumentation

- VTV-rapport, ABRACE
- Teknisk test EN16139 L2 UK
- Flammetest EN1021 1&2

Kan rekvireres hos Wellness Nordic.

### Rengøring ABRACE

Daglig rengøring: vand/sæbe.

Desinfektion: Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-92 eller Ethanol (70-85).

### Rengøring/vask tilbehør

Vaskes på 60°C. Tørres fladt eller hængende.

### ⚠ Sikkerhed

Vær opmærksom på

- at fodpladen ikke er beregnet til at stå på.
- risiko for at klemme fingrene ved brug af bengyngen
- at bengyngen kan slå tilbage mod hælen, hvis bengyngen slippes i fart.
- at rygning bør undgås i ABRACE
- at ABRACE skal stå på et fast og stabilt underlag.

### Garantibestemmelser

Handelskøb: 1 års reklamationsret  
Derudover henvises til Købelovens almindelige bestemmelser vedr. mangler, reklamationer m.v.

Wellness Nordic påtager sig intet ansvar udover det ovenfor anførte.

### Supplerende sanseredskaber øger den terapeutiske værdi

Den beroligende og tryghedsskabende effekt af ABRACE styrkes, og brugerens kropsbevidsthed øges, når stolen suppleres med ABRACE tyngdetæpper, tyngdeponcho og krammepude.



Krammepuden kan støtte nakke eller lænd og kan lynes på ponchoen eller benyttes alene.

### Egenskaber

De supplerende sanseredskaber anvendes til at omslutte brugeren for at give øget individuel sansestimulering og yderligere tryghed.

Stoffet, som er en flammehæmmende kombination af kunstlæder og vævet tekstil, gør det ekstra sikkert for brugeren at anvende stolen.

"Håndtagene" kan anvendes til at trække/skubbe bennyngen frem/tilbage. Bennyngen trækkes ud, når stolen skal i brug, og skubbes tilbage under stolesædet efter anvendelse.

Tyngdetæpper kan fastgøres med lynlås for at sikre, at de ikke falder på gulvet eller bliver væk. Det er muligt at fastgøre i alt fire tyngdetæpper (ekstra tæpper fås som tilbehør).

Fodpladen kan gysse frem og tilbage ved hjælp af fødderne. Bevægelsen afleder nervøs energi og minimerer rastløshed.

Afskærmning i begge sider reducerer omfanget af visuelle og auditive indtryk og sikrer øget ro og fokus.



Fodpladen kan vippe frem og tilbage med fødderne. Bevægelsen styrker blodcirkulationen ved at aktivere venepumpen.

Det stærke stel støtter hele vejen rundt og sikrer, at stolen ikke vipper eller vælter.



TRYGHED

RO

VELVÆRE

BEVIDSTHED

BALANCE

Distribution Danmark:

**Wellness Nordic**

Wellness Nordic A/S · Bakkegårdsvej 311 ■ 3050 Humlebæk  
 Tlf. 3874 5450 ■ info@wellnessnordic.com ■ www.wellnessnordic.dk