



Wellness Nordic Gyngestolen Vejledning



Tænd/sluk gyngestolen
Stolen tændes/slukkes på siden.



Indstil fodstøtten
Fodstøtten hæves ved at holde hånden under og løfte. Den sænkes ved at løfte helt op og slippe.



Styr med fjernbetjeningen
Stolen styres med fjernbetjeningen, som ligger i lommen under hovedpuden.



Hjælp brugeren
Det anbefales at hjælpe brugeren op i stolen ved bl.a. at støtte.



Vend fjernbetjeningen korrekt
Fjernbetjeningens sensor i bunden peges mod stolens sensorer (findes i begge sider).



Vælg mellem 3 programmer:
Relax (20 min.)
Velegnet som f.eks. afslapning for demente. Musik.




Tænd/sluk fjernbetjening
Fjernbetjeningen tændes på fronten (øverste venstre hjørne). Blåt lys indikerer, at den er tændt.



Refresh (20 min.)
Velegnet til f.eks. povernaps for personer, som er bevidst om egen situation. Musik.



Drej armlænen
For lettere at komme op i stolen, kan armlænen drejes udad: Løft armlænet og drej.

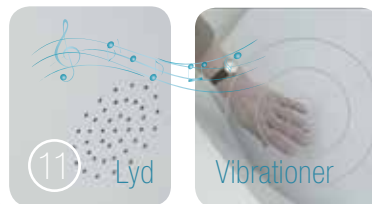

Justeringer via fjernbetjeningen
Det er muligt at indstille gyngning (Swing), ryglæn (Recline), lydstyrke (Volumen) og vibrationer i ryglæn (bass).



Indstil armlænet i forskellige positioner
Armlænet kan stå i forskellige positioner – når armlænet "går i hak", er det låst.

