



Quickguide Nordic Sensi® Bed

Version 2:1 02_2025





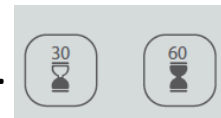

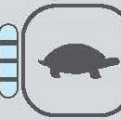1. Kør sengen fri fra væggen ved hovedgærdet. Slå sengehestene op. Sæt liggefladen i neutral, vandret position eller alternativt med let eleveret hovedgærde.
2. Sengegyngen monteres midtercentreret under sengerammen fra en af sengens sider. Den er monteret korrekt, når begge ombuk på vangerne ligger tæt ind mod sengens ramme.
3. Tilslut det orange strøm kabel.
4. Når den er monteret korrekt, aktiveres højdemotoren, og hele sengen løftes 2 cm.
5. Tiden er fabriksindstillet på 30 minutter alternativt kan 60 minutter vælges inden start.
6. Sengegyngen startes på den grønne knap og sættes på pause på den højre knap.
7. Hastigheden kan reguleres op og ned
8. Gyngen stopper automatisk efter 30 eller 60 minutters gyngning. Efter endt gyngning og ved behov for fuld standsning af programmet før tid, trykkes kontinuerligt, indtil sengegyngen er i nederste position og motorlyden stopper. Sengegyngen kan nu fjernes fra sengen.
9. CPR knappen anvendes kun i nødstilfælde – alle funktioner standses og 0-stilles.



Wellness Nordic



Funktionsknapperne på Nordic Sensi® Bed Version 2:1 02_2025

Knap	Funktionsbeskrivelse
	monterings-knappen: Når den aktiveres, løftes hele sengen 2 cm fra gulvet. Denne knap aktiverer udelukkende funktion, når vangerne er monteret korrekt under sengerammen og sikkerhedsmekanismerne tillader det.
	Stop-knappen: Gyngen stopper automatisk efter 30 eller 60 minutters gyngning. Efter endt gyngning og ved behov for fuld standsning af programmet før tid, trykkes kontinuerligt, indtil sengegyngen er i nederste position og motorlyden stopper. Sengegyngen kan nu fjernes fra sengen. Denne funktion anvendes også når sengen skal køres eller skal monteres under en ny seng.
	Start-knappen: den grønne knap starter gyngning og genstarter efter en pause. Når sengen startes, gynger den ca. 13. cm frem og tilbage i sengens længderetning. Pause knappen: to streger pauser gyngningen i den aktuelle position.
	Tids-knapperne: fabriksindstillingen er 30 minutter. Hvis 60 minutter ønskes vælges dette <u>inden</u> startknappen aktiveres. Vil man ændre tid, skal Stop-knappen aktiveres. Tiden starter forfra på det, der er valgt.
	Hastigheds-knapperne: i fabriksindstillingen er hastigheden på niveau 2, hvilket svarer til 14 sek/gyngecyklus. Niveau 1: 27 sek/ gyngecyklus, niveau 3: 9 sek/gyngecyklus, niveau 4 7,5 sek/gyngecyklus.
	CPR-knappen: anvendes kun i nødstilfælde – alle funktioner standses og 0-stilles.

